

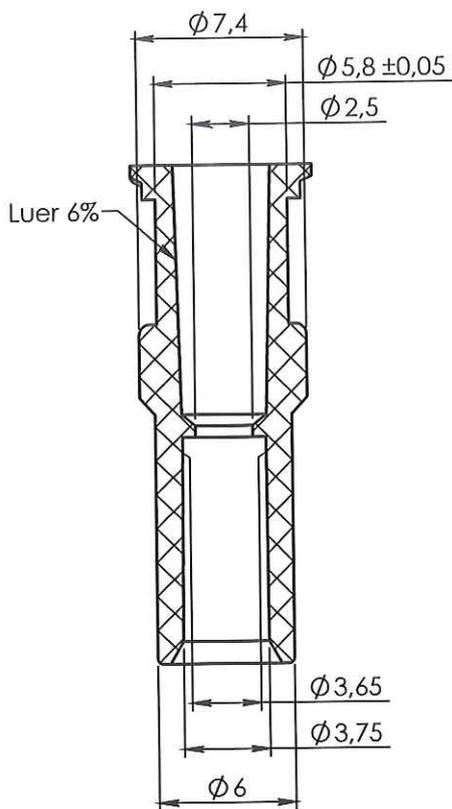
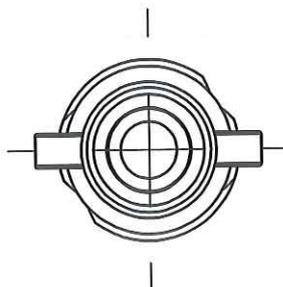


ECHELLE 1:1

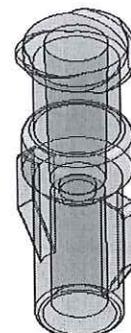

COUPE A-A

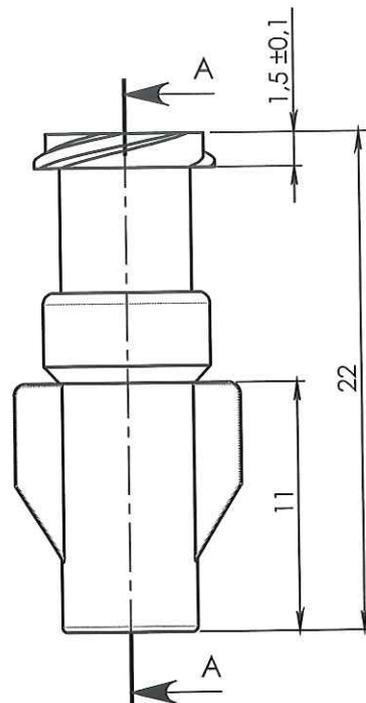

1	11/01/2011	WETLEY	Mise au format SW		
0	29/06/2006	PASSEROTTI	Creation		
Rev.	Date	Designer	Modifications	Internal Validation	Quality Validation
Dessinateur : PASSEROTTI Date : 29/06/2006		Visa : <i>Fred Danchev</i> Date : <i>21.09.11</i>		Echelle : 3:1 Unités : mm, °, grs	Tolérances générales : ± 0.3
Matière : PC				Normes : ISO 594-1	
Code matière : M0260				P. 1 / 1	
Référence : ABQ12310 Désignation : LUER LOCK FEMELLE PC RX1805 POUR TUBE ØE 3.6mm				Révision : 1	 FOR035-0