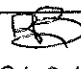
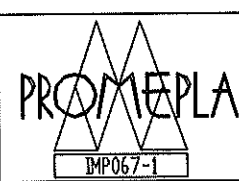


Rév.	Date	Modifications	Visa
3	26/02/04	Cote $\phi 7$ devient $\phi 6,9$, Angle de 1° devient $0,5^\circ$	PASSEROTTI
2	04/02/04	Cote $\phi 4,05$ passe $\phi 4,15$, collerettes 5 devient 8	PASSEROTTI
1	20/01/04	Cote $\phi 4$ passe $\phi 4,05$, modification chanfrein entrée sur $\phi 4,05$	PASSEROTTI
0	16/12/03	Création plan	PASSEROTTI
Dessinateur :	DATE :	Visa :	PROMEPLA
Passerotti P	16 / 12 / 2003	 Date : 22/10/2004	Echelle : 3 / 1
Matière : ABS Terlax 2812 TR		Normes :	
Code matière : M0287		Tolérances générales $\pm 0,1$	
N° Référence : AEG04050		Révision : 3	 IMPO67-1
Désignation : Raccord pompe silicone / silicone pour tube 1.6x4.8 et 2.4x5.6			