



ECHELLE 1:1

Rev.	Date	Designer	Modifications	Internal Validation	Quality Validation
2	24-03-06	BOUCHARD	Ajout R0.3 + 3xØ3.6 devient 3xØ3.2 sur 180° et 3xØ3.5 devient 3xØ3.1 sur 180°		
1	18-11-05	BOUCHARD	Ch 1 devient 0.5. TROU 3xØ3.9 devient 3xØ3.85		
0	08-11-05	BOUCHARD	Creation		
Dessinateur : BOUCHARD Date : 24-03-06	Visa : <i>Fred Duchin</i> Date : <i>21.09.11</i>	PROMEPLA	Echelle : 3:1 Unités : mm, °, grs	Tolérances générales : ±0.1	
Matière : PC			Normes :		
Code matière : M0260			P. 1 / 1		
Référence : AGG03090 Désignation : Y EN PC A 3 VOIES PARALLELES POUR TUBE ØE 4.1mm / LUER MALE			Révision : 2	 FOR035-0	